



## **2.322 con R-Net**

Velocidad 15 km/h

---

# **Instrucciones adicionales**

---

El grupo MEYRA ofrece la silla de ruedas OPTIMUS 2 (modelo 2.322) en tres niveles de velocidad. Además de los modelos de 6 km/h y 10 km/h, disponibles desde hace muchos años, también se ofrecen vehículos con una velocidad máxima de 15 km/h. A día de hoy, este nivel de velocidad es poco común para sillas de ruedas y por tanto impone requisitos especiales tanto a la adaptación de la silla de ruedas como a la experiencia del usuario en el manejo de la misma.

Por ello, se han tomado precauciones especiales en todas las unidades con el fin de adaptar la sensibilidad de la dirección a las distintas velocidades. Además ha sido implementada una reducción especial de la velocidad en curvas. Al entrar en una curva, la silla de ruedas reduce automáticamente la velocidad.


A pesar de todas estas precauciones, es imprescindible que el usuario tenga experiencia suficiente y demuestre un manejo responsable de la silla de ruedas. Las instrucciones para el manejo seguro de sillas de ruedas eléctricas están descritas en los capítulos correspondientes del folleto < *Indicaciones de seguridad y manejo generales para vehículos eléctricos* >. Este folleto es

suministrado con la silla de ruedas y forma parte de las instrucciones de funcionamiento.

Para ganar la práctica necesaria en la conducción, el usuario debe aprender a manejar su nueva silla de ruedas inicialmente a una velocidad por debajo de la velocidad máxima. Para ello, los modelos OPTIMUS 2 se suministran con una velocidad máxima limitada a 12 km/h. Esta velocidad es apta para que el usuario aprenda el manejo seguro del vehículo. En cuanto el concesionario especializado esté convencido de la capacidad del usuario para el manejo seguro, la velocidad puede ajustarse al nivel máximo de 15 km/h mediante un sencillo ajuste. El ajuste no requiere herramientas adicionales. El cambio de velocidad se efectúa insertando un puente, suministrado con el vehículo, en un libre puesto de conexión (1) en la electrónica de potencia. Véase el dibujo.

Si el puente conectado (velocidad máxima de 12 km/h), la indicación de velocidad del módulo de manejo LED parpadea, y en el módulo de manejo LCD aparece el símbolo de tortuga naranja.

En caso de dudas o preguntas acerca de la adaptación, rogamos póngase en contacto con el correspondiente departamento de servicio técnico del grupo MEYRA.

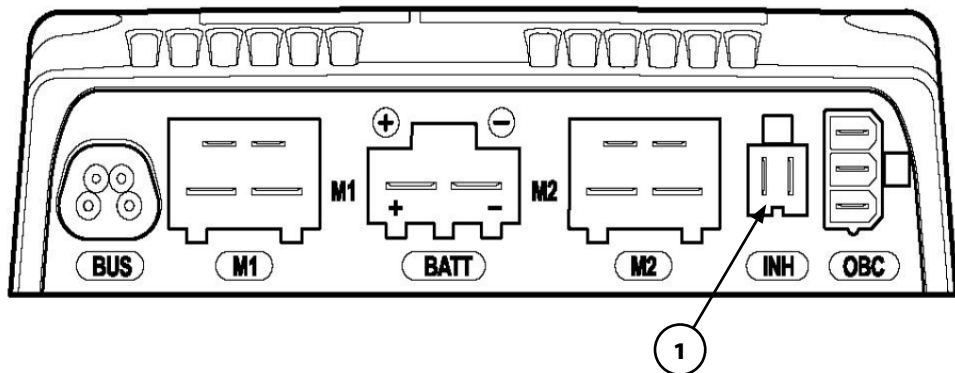

---

## MEYRA GmbH

📍 Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal-Kalldorf

🗨 Tel +49 5733 922 - 311  
Fax +49 5733 922 - 9311

✉ info@meyra.de

www.meyra.de

---



Este producto está conforme con la directiva de la Comunidad Europea 93 / 42 / CEE correspondiente a los productos médicos.

**MEYRA** 205 341 404 (estado: 2013-10) Modificaciones técnicas reservados.