

FICHA TECNICA "ANDADOR FIJO"

<b>NOMBRE:</b>	<b>ANDADOR FIJO</b>
<b>TALLA:</b>	<b>N/A</b>
<b>MARCA:</b>	<b>FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD (CAREMAX)</b>
<b>FABRICANTE:</b>	<b>FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD (CAREMAX)</b>
<b>PAIS DE FABRICACIÓN:</b>	<b>CHINA</b>



**USO:**

- Tradicional andador fijo, ideal para usuarios con movilidad reducida que necesiten un soporte para desplazarse. Fabricado en aluminio y regulable de altura.

**CARACTERISTICAS:**

- Estructura tubular en aluminio anodizado.
- Altura Regulable de fácil ajuste, según estatura de la persona con:
  - Medio de fijación seguro en cualquier posición.
  - Regulaciones de 2,5 cm cada una.
  - Manipulable sin uso de herramientas.
  - Altura Regulable:
- Con 4 regatones (tacos) de goma antideslizantes en los puntos de apoyo.
- Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes para dar mayor seguridad en el agarre.
- Cuenta con manual de uso.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Estructura tubular de 3 cm de diámetros.
- Altura regulable 75 - 94 cts.
- Largo: 49 cms. Ancho: 60 cms. Alto: 90 cm.
- Peso Neto: 2.6 Kg.
- Resiste como peso de usuario 100 kgs.

\*Las imágenes contenidas en este sitio son meramente ilustrativas, no constituyendo una representación exacta de la realidad.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO ANDADOR FIJO (revise instrucciones de montaje según la opción de producto adquirido)

### Uso adecuado

Este andador articulado y de peso ligero ha sido diseñado para ayudar al usuario a caminar. Es ideal para ser utilizado en interiores y ha sido diseñado para que sea ligero y manejable, ofreciendo al mismo tiempo estabilidad y seguridad al usuario.

 **ADVERTENCIA** Peligro de caída!

- ▶ No ponerse de pie sobre este producto.
- ▶ No utilizar como elemento auxiliar de ascenso.

 **ADVERTENCIA** Peligro de caída!

Los manillares se pueden utilizar en ambos lados por igual. Si se aplica presión en un solo lado, utilice solamente la mitad del peso corporal. En caso de sobrecarga, el reposabrazos puede romperse.

### Montaje e instrucciones para la primera utilización:

 **¡PRECAUCIÓN!** Riesgo de quedar atrapado

- ▶ Proceda con cuidado durante el montaje.

El andador se suministra embalado en una caja de cartón sin terminar de montar. Antes de utilizarlo, hay que montar el aparato de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- a) Sacar el andador y todos sus componentes de su embalaje.
- b) Para montar el andador, sujetar un manillar y abrir hasta que los dos laterales estén extendidos.
- c) Comprobar que los dos laterales hacen contacto con el suelo y que el andador está estable en posición abierta.
- d) Introducir el soporte medio en el tubo o chasis del andador.
- e) Seleccionar la altura necesaria del manillar y fijarla con la horquilla de regulación de altura.

 **¡PRECAUCIÓN!** Riesgo de lesiones

- ▶ Asegúrese de que todas las horquillas de seguridad están montadas correctamente.

### Ajuste de la altura:

- a) Para ajustar la altura del manillar, aflojar la horquilla a ambos lados girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
- b) Ajustar la altura del andador de acuerdo con la del usuario.

\*Las imágenes contenidas en este sitio son meramente ilustrativas, no constituyendo una representación exacta de la realidad.

## Transporte y montaje:

- a) Plegar el andador para su transporte: Quitar la cesta y levantar el asiento; luego, tirar del cordón negro por debajo del asiento mientras se sujetan los manillares del andador levantándolo al mismo tiempo.
- b) Para desplegar el andador antes de utilizarlo, levantarlo por los manillares y el cordón y colocar primero las ruedas en el suelo. Ello le permitirá desplegar el andador fácilmente después de soltar el cordón.

## Vida útil

La vida útil prevista para este producto es de tres años, siempre y cuando se utilice de conformidad con las instrucciones de seguridad y se respeten los intervalos de mantenimiento y el uso previsto, tal y como se indica en el presente manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

## Seguridad

 **ADVERTENCIA** Peligro de lesiones!

- a) No utilizar en malas condiciones.
- b) No ponerse de pie sobre este producto.
- c) No lo utilice como ayuda para escalar.
- d) No utilice el andador como apoyo para ponerse de pie.
- e) No levante el producto por las manillas para recolocarlo o desplazarlo mientras haya alguien sentado.
- f) No exceder el peso máximo de usuario indicado en la etiqueta del producto.
- g) No utilizar el andador para caminar hacia atrás, bajar cuestas, subir escaleras o superar obstáculos.
- h) Comprobar que los manillares están a la misma altura y correctamente fijados en posición.
- i) Antes del uso, comprobar que las piezas no hayan sufrido daños durante el transporte. En caso de daños durante el transporte, no utilizar el aparato.
- j) Si no se utiliza el aparato durante un largo periodo, hacer que lo revise un especialista antes de utilizarlo de nuevo.

 **PRECAUCIÓN!** Riesgo de quemaduras en la piel!

Los componentes del producto pueden calentarse si se exponen a fuentes externas de calor.

- No exponga el producto a la luz solar intensa antes de utilizarlo.

## Limpieza y desinfección

- a) El producto puede limpiarse y desinfectarse con productos disponibles comercialmente. Se recomienda utilizar agua y jabón suave y un producto de limpieza no abrasivo para la limpieza del aparato.
- b) Desinfecte el producto limpiando todas las superficies accesibles con desinfectante (después de desmontarlo, si es posible).
- c) Todos los productos de limpieza y desinfectantes empleados deben ser eficaces, compatibles entre sí y deben proteger los materiales que van a limpiar. Con respecto al tiempo de contacto y concentración, consulte la lista de desinfectantes que facilita la Verbund für Angewandte Hygiene e.V. ( – Asociación para la higiene aplicada, [www.vah-online.de](http://www.vah-online.de)) y la Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e.V. ( asociación alemana para el control de las enfermedades víricas, [www.dvv-ev.de](http://www.dvv-ev.de)).

\*Las imágenes contenidas en este sitio son meramente ilustrativas, no constituyendo una representación exacta de la realidad.

### **Mantenimiento y revisión periódica**

Si se respetan las indicaciones de limpieza y seguridad anteriores, el producto no necesita mantenimiento. Revise el producto periódicamente para comprobar que no tiene daños y asegurarse de que está montado de forma segura.

### **Uso repetido**

El producto es adecuado para un uso repetido. El número de veces que se puede volver a utilizar depende de la frecuencia de uso y de la forma de usarlo. Antes de volver a utilizarlo, se ha de realizar una limpieza higiénica del producto y comprobar su seguridad técnica funcional, y restablecerla en caso de que fuera necesario.

### **Eliminación**

La eliminación y aprovechamiento de aparatos viejos y embalajes debe realizarse de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

### **Garantía**

Ofrecemos la garantía del fabricante del producto conforme a nuestras Condiciones generales y Condiciones comerciales.

\*Las imágenes contenidas en este sitio son meramente ilustrativas, no constituyendo una representación exacta de la realidad.